



Electric Ink

PERMANENT
make UP

INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções descritas nessa bula antes de utilizar o produto.

- Produto para uso profissional.
- O objetivo da bula é fornecer instruções de uso seguro e de Boas Práticas de Micropigmentação.
- Você encontrará informações importantes sobre o produto e seu modo de uso.
- É indispensável a realização de testes preventivos de alergia ao produto no cliente.
- É desaconselhável a micropigmentação em indivíduos com histórico de reações alérgicas.
- Ressalta-se que o produto é de uso profissional, exclusivamente.
- Caso necessite de mais informações, utilize nosso serviço de atendimento ao consumidor.
- Produto estéril.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nome Técnico: Pigmentos, Veículos e Solventes para pigmentação artificial da pele.

Nome Comercial: Pigmento para Micropigmentação Linha Orgânica Electric Ink Permanent Make Up.

Registro na Anvisa: N° 80485730022

Composição: Água deionizada, surfactante não iônico, glicerina vegetal USP, propileno glicol USP e pode conter pigmentos indicados abaixo, verificar composição conforme rótulo de cada produto.

C.I. 77891 C.I. 11741 C.I. 21110 C.I. 12475 C.I. 73915 C.I. 51319 C.I. 74160

C.I. 74260 C.I. 77266

Método de Esterilização: Raios Gama.

Validade do produto: 24 meses na condição de frasco lacrado e 6 meses após aberto.

APRESENTAÇÃO

Os pigmentos para micropigmentação, são apresentados na condição estéril prontos para uso, em frascos de 8 mL e 15 mL com tampa bico dosador, acondicionados individualmente em cartucho de papel cartão.

Cada frasco de produto é identificado com rótulo contendo informações do nome do produto (cor), data de validade, número do lote de fabricação e com área para registro da data de abertura do frasco.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO



Mantenha o produto ao abrigo da luz solar direta. Armazene sob condições de temperatura entre 10°C e 40°C e em local seco. O produto não deve ser refrigerado.

Antes de abrir o frasco do produto para manuseio, rompendo o lacre da tampa, assinale no rótulo o mês e o ano correntes. Não utilize o conteúdo do frasco após seis meses da data de abertura e nem após o prazo de validade registrado no rótulo.



Se, ao inspecionar um produto para uso, o frasco estiver danificado, com vazamento ou com prazo de validade vencido, realizar então o descarte ambientalmente adequado seguindo as instruções descritas na seção “Disposição de Resíduos”. Nunca derramar o conteúdo do frasco no efluente de esgoto doméstico ou na pia.

Após o uso do produto, mantenha sempre o frasco devidamente fechado.

Recomenda-se manter o frasco dentro de seu cartucho juntamente com as instruções de uso.

PROPÓSITO DE USO

O pigmento de micropigmentação, ou qualquer componente da sua fórmula, não tem função terapêutica no organismo ou de diagnóstico de saúde.

O resultado esperado da aplicação desse produto é a pigmentação artificial da pele, para fins estéticos ou corretivos, por técnicas de micropigmentação da epiderme.

Esse produto é indicado para uso exclusivo de profissionais capacitados, com domínio da técnica de micropigmentação e de boas práticas de higiene, em clínicas de micropigmentação devidamente inspecionadas e aprovadas por profissionais da Vigilância Sanitária.

RESTRIÇÃO DE USO

Esse produto não deve ser utilizado em indivíduos que apresentam histórico de hipersensibilidade (urticária, dermatites, eczema etc) e de reação alérgica a pigmentos ou a qualquer componente da fórmula.

Não utilizar o produto para a pigmentação artificial em córneas.

Observação: Aplicação deste produto em mucosas poderá resultar em irritações.

Não realizar procedimento de micropigmentação em indivíduos com doenças agudas ou crônicas que afetam a pele.

Não aplicar o produto em pele lesionada ou ferida por processo infeccioso.

Os pigmentos para micropigmentação Nuance não devem ser utilizadas nos seguintes casos: gestantes, lactantes, predisposição a queloides, lúpus, hemofílicos, epiléticos, soropositivos ou outras doenças infectocontagiosas.

Será de responsabilidade do profissional, caso o produto seja utilizado de forma indevida. O mau uso poderá comprometer o resultado final do procedimento.

PROCEDIMENTO DE USO

Assegure-se que todos os cuidados de assepsia do local de trabalho e da pele sejam tomados, e as precauções descritas nessa bula sejam respeitadas, para

garantir o sucesso do procedimento de micropigmentação.

Após o término da micropigmentação, siga as instruções descritas na seção “Informações ao Cliente”.

PREPARAÇÃO E SANITIZAÇÃO

Antes de iniciar o procedimento de micropigmentação em cada cliente, o profissional deve:

- Paramentar-se com jaleco limpo, touca, óculos e máscara.
- Certificar-se que o local de trabalho está limpo e foi sanitizado com produto registrado na Anvisa.
- Preparar o local de trabalho incluindo os frascos de tinta, dermógrafo, tebori, agulhas esterilizadas e descartáveis, luvas de procedimento, papel toalha, batoques descartáveis.

Precauções: Não utilizar o pigmento se o frasco estiver violado.

Agitar cada frasco até completa homogeneização da tinta. Aconselhamos o uso de um agitador mecânico apropriado.

d. Lavar as mãos com sabonete antisséptico e em seguida secá-las com papel toalha descartável.

e. Calçar as luvas de procedimento.

f. Lave a área da pele do cliente com sabonete antisséptico e seque com papel toalha ou gaze.

g. Em um batoque estéril, gotejar a quantidade de pigmento necessária. Em seguida feche o bico dosador do frasco.

Precauções: Nunca tocar o bico dosador do frasco no pigmento contido no batoque.



Nunca transfira o conteúdo de um batoque de volta para o frasco de pigmento.



DESENVOLVIMENTO DAMICROPIGMENTAÇÃO

a) Abra a embalagem de agulhas e certifique-se, com auxílio de uma lupa, que as pontas dessas agulhas não estão danificadas antes de encaixá-las no dermógrafo/tebori.



torta

cega

deformada

amassada

correta

Precaução: Agulhas com pontas danificadas (tortas, cegas, deformadas, amassadas) comprometem excessivamente o tecido da pele prejudicando a qualidade da micropigmentação. Utilize somente agulhas novas e descartáveis.

- b) Empunhe o dermógrafo e molhe as agulhas no pigmento contido no batoque.
Precaução: Evite tocar a ponta das agulhas no batoque para não as danificar.
- c) Proceda com a micropigmentação da pele do cliente seguindo o desenho escolhido.
- d) Com papel toalha limpo, retirar cuidadosamente o excesso de pigmento sobre a pele.

PRECAUÇÕES

Os pigmentos para micropigmentação contêm substâncias que podem provocar reações alérgicas na pele de pessoas sensíveis. Testes preventivos de alergia devem ser realizados sob orientação médica.

Somente utilizar o produto para a pigmentação artificial de cicatrizes sob orientação médica.

O fabricante não se responsabilizará por efeitos adversos de uso indevido do produto, por utilização combinada com produtos de terceiros, pois podem resultar no insucesso do procedimento, em danos aos tecidos e resultados estéticos insatisfatórios.

Mantenha os frascos de pigmento fora do alcance de crianças.

ADVERTÊNCIAS

Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico.

O profissional deverá preencher o Relatório de Reações Alérgicas a Pigmentos (RRAP) e enviá-lo ao fabricante no prazo de até 70 dias. Uma cópia do formulário de RRAP será fornecido.

Em caso de ingestão acidental do pigmento: consulte um médico.

DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS

Para a disposição ambientalmente adequada dos resíduos do procedimento de micropigmentação siga as instruções na legislação vigente. As agulhas devem ser dispostas em recipientes apropriados para coleta por empresa homologada pela prefeitura local. Não derramar o conteúdo do frasco no efluente de esgoto doméstico ou pia.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Informações ao cliente sob corresponsabilidade do profissional.

Em caso de hipersensibilidade ou de reação alérgica, consultar um médico.

Em caso de infecção da pele por fungos ou bactérias, busque a orientação de um médico.

Evite friccionar a área micropigmentada durante o banho. Lavar cuidadosamente com sabonete antisséptico.

Evite utilizar produto farmacêutico ou cosmético sobre a pele micropigmentada. Caso necessário, utilize somente os produtos prescritos por um médico dermatologista.

Evite exposição ao sol, sauna, banhos de piscina e mar até a cicatrização completa da pele.





Evite carnes e alimentos excessivamente gordurosos na semana anterior e posterior a do procedimento de micropigmentação. Alimentar-se de produtos saudáveis durante os primeiros quinze dias após o procedimento de micropigmentação para uma cicatrização da pele mais rápida e adequada.

RASTREABILIDADE

Para assegurarmos a rastreabilidade do produto, segurança do paciente e do profissional, adequação às exigências da legislação local e da Garantia da Qualidade, recomendamos que os dados do lote sejam registrados de maneira apropriada pelo profissional. Assim, o profissional responsável pelo procedimento deve manter registro dos seguintes dados para cada procedimento realizado e para cada cliente:

- Nome da clínica/estúdio;
- Nome do profissional micropigmentador;
- Nome do paciente;
- Data do procedimento;
- Número do lote de cada um dos produtos (pigmentos) utilizados.

RECOMENDAÇÕES

A clínica/estúdio de micropigmentação deve manter para cada cliente:

- a. Uma ficha cadastral com os dados do cliente, incluindo os dados solicitados na seção Rastreabilidade.
- b. Uma ficha de anamnese.
- c. Aos menores de 18 anos de idade, o procedimento de micropigmentação deverá seguir a legislação vigente de cada estado brasileiro.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Caso necessite de mais informações sobre os produtos, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor (SAC) pelo telefone (34) 3326.7000 ou e-mail: sac@electricink.com.br

FABRICADO POR:

ELECTRIC INK INDÚSTRIA COM. IMP. E EXP. LTDA.

CNPJ: 08.244.232/0001-05

Av. Cel. Zacarias Borges de Araújo, 1200 - Uberaba/MG - Indústria Brasileira.

Responsável Técnico: Josiene de Paula - CRQ/MG nº: 02410919 - 2ª Região

Responsável Legal: Paulo Fernando Gonçalves Angotti

STERILE Esterilizado por raios gama



Evitar exposição direta à luz solar



Não utilizar se a embalagem estiver violada



Uso recomendado para profissionais

